

FOB pozitív kontroll használható a FOB-CHECK-2 mennyiségi gyors teszthez

I. LEÍRÁS

- 1 kisüveg FOB pozitív kontroll (Ref.V080).

A pozitív kontroll hígított humán hemoglobint tartalmaz, mely anti-HIV, anti-HCV és HBs antigén vizsgálata során negatívnak bizonyult. (0.05% NaN_3 -ot tartalmaz).

- Használati útmutató.

Liofilizált kontroll minta.

Csak in vitro diagnosztikai célra használható, szakemberek által.

II. TÁROLÁSI FELTÉTELEK

1. A felbontatlan üveget tárolja + 4°C - +30°C között.
2. Ne használja a címkén feltüntetett lejárati időn túl.

III. A TESZT KIVITELEZÉSE

1. Rekonstítuálja az üveg tartalmát 0.5 mL desztillált vízzel.
2. Hagyja állni 15 percig.
3. Mérje a kívánt térfogatot (150 μ L) használjon pipettát (eldobható csúccsal) a tesztkazetta mintahelyére, a továbbiakban folytassa a betegminta vizsgálatával megegyező módon.
4. A rekonstítuált kontrollmintát tartsa +2°C - +8°C között és használja fel a rekonstítuálást követő 24 órán belül.

IV. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE

A teszt eredményének meghatározásához használja a VEDALAB Easy Reader[®] gyors teszt leolvasó készüléket, a FOB-CHECK-2 útmutató szerint.

Koncentráció tartomány:


- Pozitív kontroll: [166 - 277] ng/mL*

V. A TESZT KORLÁTAI

- A pozitív kontroll a laboratóriumi vizsgálat minőségi ellenőrzéséhez használható, de nem alkalmas a teszt teljesítőképességének validálására.
- A megfelelő eredmény érdekében, javasolt automata laboratóriumi pipetta használata a kvaliti kontroll kivitelezéséhez.



Működtetési információk

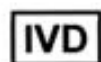

In vitro diagnosztikai használatra

Gyártó VEDALAB - Franciaország

*A kontroll elfogadhatósági tartománya LOT számtól függően változik.

